

Provtagningsanvisningar Cytologi

Sköljvätska och borstprov från bronker

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” CYTOLOGI ALLMÄN REMISS (ej vaginalcytologi)
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock. Endast objektglas med mattrand får användas. Märk objektglas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. Använd blyertspenna. Antal objektglas skall anges på remiss.
Fixering	Bronksköljvätska fixeras med 50%-ig etanol - lika delar prov och sprit. Eventuella utstryksglas skall omedelbart fixeras i en kyvett med 95%-ig etanol minst 30 min. Preparaten får sedan lufttorka. Insänds till laboratoriet i preparataskar.
Utförande	Blanda bronksköljvätska omedelbart efter sköljningen med samma mängd 50%-ig etanol. Vid eventuell aspiration, direktskrap och borstning - för över materialet omedelbart till ett förmärkt kärl med ca 5-10 ml 50%-ig etanol. De instrument som använts vid bronksköljning eller borstning kan sköljas i etanol eller koksaltlösning efter provtagningen, så att inget material går förlorat. Borstprov kan eventuellt strykas ut direkt i samband med provtagningen. Använd 2-4 fömärkta objektglas med mattrand och stryk ut sekretet tunt direkt från borsten.
Övrigt	Alternativt kan borsten läggas i 95% -ig etanol och skickas in till laboratoriet. Ange alltid provtyp både på remiss och burk.
Kontakt	Enhetschef cytologi tel. 031-342 19 98 Cytologens laboratorium tel.031-342 21 85
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. De speciella objektglasförpackningar av plast (prov askar), som rekvireras från laboratoriet, skall ej märkas. Ofixerade vätskor lämnas direkt till labpersonal vid provinlämning före kl.14.00.

