

## Provtagningsanvisningar Patologi

### Prover med lymfomfrågeställning

<b>Remiss</b>	Remiss ifylls enligt anvisningar ” <a href="#">Så här fyller du i remissen</a> ”  <a href="#">PAD-remiss Allmän</a>
<b>Allmänt</b>	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. <b>Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</b>
<b>Fixering</b>	<b>Färska ofixerade vävnadsprover t.ex. lymfkörtlar, mjälte mm</b> Kompress genomdränkt med fysiologisk koksaltlösning  <b>Nålbiopsier:</b> 4 % fosfatbuffrad formaldehyd  <b>Benmärgsbiopsier</b> Histoconlösning (transportmedium, beställs på Histolab Products AB tel. 031-709 30 30 eller <a href="http://www.histolab.se">www.histolab.se</a> )
<b>Utförande</b>	<b>Färska ofixerade vävnadsprover t.ex. lymfkörtlar, mjälte mm</b> Lägg i kompress genomdränkt med fysiologisk koksaltlösning och placera i en provburk. Provburken transporteras sedan kyld med is runt om (t.ex. i en större burk med isbitar).  <b>Nålbiopsier:</b> Lägg provet direkt i burk <u>helt</u> fylld med formaldehyd.  <b>Benmärgsbiopsier:</b> Lägg direkt i rör fyllt med Histoconlösning OBS! Skicka med perifert blod- och benmärgsutstryk.
<b>Övrigt</b>	Färska prover med misstänkt TB-frågeställning ska fixeras med 4 % fosfatbuffrad formaldehyd direkt vid provtagningen.
<b>Kontakt</b>	Förfrågningar kan ställas direkt till laboratoriet Dorotea Berkowicz och Christina Olsson tel. 031-342 30 22/ 031-342 15 16
<b>Transport</b>	<b>Skicka omgående till Patologen, Sahlgrenska Sjukhuset, Gula Stråket 8.</b> Ring provinlämningen och meddela att ett prov kommer, tel. 031-342 15 16  Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 För övrig tid kontakta laboratoriet och kom överens om hur man ska hantera provet.