

## Provtagningsanvisningar Patologi

### Testisbiopsier i Bouins lösning

<b>Remiss</b>	Remiss ifylls enligt anvisningar ” <a href="#">Så här fyller du i remissen</a> ”  <a href="#">PAD-remiss Allmän</a>
<b>Allmänt</b>	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. <b>Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</b>
<b>Fixering</b>	Bouins lösning  OBS! provet får inte ligga i fixeringsvätskan längre än 4 timmar
<b>Utförande</b>	<b>Om provet tas före kl 12:00</b> Lägg i Bouins lösning, <u>notera klockslag på remiss</u> och lämna till patologen inom 4 timmar  <b>Om provet tas efter kl 12:00</b> Lägg i Bouins lösning. Fixera provet i 4 timmar, <u>notera klockslag på remiss</u> . För över provet till 70% alkohol, <u>notera klockslag på remiss</u> . Lämna provet till patologen senast dagen efter.
<b>Övrigt</b>	Bouins lösning kan erhållas från Histolab Products AB tel. 031-7093030
<b>Kontakt</b>	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
<b>Transport</b>	Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning  <b>Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.</b>