

## Provtagningsanvisningar Patologi

### Biopsier från urinblåsa fixerade i IFAA

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Remiss</b>    | Remiss ifylls enligt anvisningar ” <a href="#">Så här fyller du i remissen</a> ”<br><br><a href="#">PAD-remiss Allmän</a>   |
| <b>Allmänt</b>   | Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och provtagningskärl/objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn. <b>Observera att provtagningskärl inte får märkas på lock.</b>   |
| <b>Fixering</b>  | IFFA lösning.<br><br>Lösning kan erhållas från reagensberedningen på Klinisk kemi SU<br>kontaktperson: Marianne Wallgren, tel 031-3421215   |
| <b>Utförande</b> | <b>Om provet tas före kl 12:00</b><br>– Lägg i IFAA lösning<br>– Notera klockslag<br>– <b>Lämna till patologen inom 4 timmar.</b><br><br><b>Om provet tas efter kl 12:00</b><br>– Provet läggs direkt i IFAA lösning.<br>– Fixera provet i 4-6 timmar, notera klockslag på remiss.<br>– För över provet till 70% alkohol, notera klockslag på remiss<br>– <b>Lämna till patologen inom 24 timmar.</b> |
| <b>Övrigt</b>    | <b>OBS! provet får inte ligga i fixeringsvätskan längre än 6 timmar!</b>  |
| <b>Kontakt</b>   | Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16   |
| <b>Transport</b> | Prov skall lämnas direkt till lab.personal vid Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00   |