

Provtagningsanvisningar Patologi

Fettutstryk för analys av Amyloid

Remiss	Remiss ifylls enligt anvisningar ” Så här fyller du i remissen ” PAD-remiss Allmän
Allmänt	Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remiss används för avsedd undersökning. Remisser skall fyllas i och objektglas märkas med patientens personnummer (10 siffror) och namn.
Utförande	<ul style="list-style-type: none">– Rengör objektglas med absolut alkohol.– Torka objektglaset med rispapper.– Lägg fettvävsbiopsin i petriskål innehållande lite 0,9 % natriumklorid.– Dra isär fettet med hjälp av 2 kanyler till knappt 1 mm stora bitar.– Lägg 4-5 bitar på varje objektglas (gör 3-5 objektglas)
Fixering	Låt glaset torka i rumstemperatur över natt
Kontakt	Patologens provinlämning tel 031- 342 15 16
Transport	Proven kan sändas per post, skickas med internttransport eller lämnas direkt på laboratoriet. Prov skall lämnas till Laboratoriets provinlämning före kl. 16.00 Akuta prov/snabbsvar lämnas direkt till lab.personal vid provinlämning.